

Anwendungs-

bereich:

Unblutiges bzw. minimal blutendes Schneiden von oralem Weichgewebe .
Zum ausschließlichen Gebrauch in zahnärztlichen FG Handstücken.

Anwendungs-

weise:

Die Werkzeuge sind **vor jedem Gebrauch** zu sterilisieren. Wir empfehlen ein Autoklav-Verfahren bei +134° mit 2,2 bar Druck und einer Haltezeit von mindestens 5 Minuten.

Vor jedem Gebrauch ist die Arbeitsspitze auf Unversehrtheit hin zu überprüfen.

Für optimale Leistung sind die die empfohlenen Richtdrehzahlen von 30.000 – 300.000 min⁻¹ (UpM) einzuhalten.

Um die kauternde Wirkung des Instruments zu nutzen ist eine Wasserkühlung beim Schneiden nicht erwünscht!

Instrument nur mit vorgeschriebener Drehzahl in die Mundhöhle einbringen.

Hinweise des Turbinenherstellers sind zu beachten.

Warnhinweise: Hebeln, Verklemmen sind zu vermeiden (Bruchgefahr)..

Anpressdruck und Geschwindigkeit richten sich nach der Topographie der Mucosa.

Nur in vorgesehener Richtung/Weise verwenden. Die Angaben des Turbinen-herstellers sind zu beachten.

Lagerung des Instruments nicht in Kunststofftüten. Am besten trocken bei Raumklima lagern.

Vor der Entsorgung defekter oder verbrauchter Instrumente sind diese zu sterilisieren, um das Übertragen von Krankheiten zu vermeiden.

Qualität:

Rostfreier Stahl, gehärtete Profilkörper und Schäfte. Geprüftes, Yttrium-stabilisiertes Zirkondioxid

Risiken:

Es sind bei ordnungsgemäßem Gebrauch keine Risiken vorhanden

Entsorgung:

Unbrauchbare Instrumente sind vor einer klinikgerechten Entsorgung zu sterilisieren

Rev. 09/13

Hersteller:

DFS-Diamon GmbH* Ländenstrasse 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

CE 0297