

## Durolan Stumpflack

Erstelldatum: 18.11.2014

Überarbeitet am: / /



\*Beispielabbildung

### Anwendungsbereich

Stumpflacke dienen als Platzhalter für das Befestigungsmaterial bei Kronen- & Brückenarbeiten. DFS-Diamon GmbH liefert hierzu verschieden Farben in unterschiedlichen Stärken, je nach der Gepflogenheit des Behandlers, in welcher Konsistenz er den Zement / Kleber verarbeitet.

### Anwendungsweise

Vor Gebrauch schütteln, bis eine gleichmäßige Farbtönung in der Flasche sichtbar ist. Mit dem in die Schraubkappe integrierten Pinsel gleichmäßig dünn auftragen. Als Grundierung / Stumpfhärtung empfehlen wir Plastodur (DFS). Dieses ist mit Durolan Stumpflack kompatibel und verbindet sich fest mit der nächsten aufzutragenden Schicht. Ebenso kann als erster Anstrich der Stumpflack klar verwendet werden. Wir empfehlen die erste Schicht bis über die Präparationsgrenze auszudehnen um dieser Schutz gegen mechanische Beschädigung zu geben. Nach Trocknung der ersten Lage wird der eigentliche, farbige Stumpflack appliziert. Es ist ein gleichmäßig deckender Auftrag anzustreben, welcher ca. 1mm zirkulär vor der Präparationsgrenze endet. Ist der Lack zu dickflüssig, oder zeigt er eine zu lange Trocknungszeit, kann Durolan mit dem zugehörigen Verdüner etwas modifiziert werden

### Auftragsstärke

Klar	3-5µm
Blau	4-6 µm
Rot	8-12 µm
Silber	12-14µm
Gold	14-16µm

Die Trocknungszeit beträgt ca. 30 Sekunden. Nach der Trocknungszeit können weitere Schichten aufgetragen werden. Die Viskosität kann mit dem dazu gehörenden Verdüner gesteuert werden.

### Schutzmaßnahmen

- Handschutz:** Schutzhandschuhe aus **PVC** tragen. Bei längerem oder wiederholtem Kontakt: Schutzcremes auf die Hautflächen auftragen, die mit dem Produkt in Kontakt kommen.
- Augenschutz:** Zum Schutz gegen Lösungsmittelspritzer Schutzbrille tragen.
- Körperschutz:** Tragen antistatischer Kleidung aus Naturfaser (z.B. Baumwolle) oder hitzebeständiger Synthetikfaser. Nach Kontakt Hautflächen gründlich reinigen.

### Eigenschaften

- Beständig gegen Wasserdampf und Isolierrmittel.
- Gleichmäßig deckend, kratzfest und isolierend.

# Gebrauchsanweisung


Copyright by DFS-Diamon GmbH

Seite 2 / 2



## Durolan Stumpflack

Erstelldatum: 18.11.2014

Überarbeitet am: 

### Lagerung

Lagerung in Übereinstimmung mit den Vorschriften über das Lagern brennbarer Flüssigkeiten (VdF). Maximal 2 Jahre bei gleichmäßiger Temperatur nicht über 30° C.

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH  
Ländenstraße 1  
93339 Riedenburg  
Germany