

# Gebrauchsanweisung

Copyright by DFS-Diamon GmbH

Seite 1 / 1

## Isofix

Erstelldatum: 17.02.2016

Überarbeitet am: / /



\*Beispielabbildung

### Anwendungsbereich

Isolierung von Modellstümpfen bei Wachsarbeiten in der Kronen- und Brückentechnik

### Anwendungsweise

Den Stumpf einmal dünn mit dem in der Verschlusskappe integrierten Pinsel bestreichen und ca. 30 Sekunden einwirken lassen. Überschüssiges Liquid sanft mit Luftdruck abblasen. Auftragen und/oder Wachstauchen wie gewohnt. Nach Gebrauch Flasche wieder fest verschließen.

### Qualität

Isofix bildet einen dünnen Mikrofilm von 3-5 $\mu$ . Kompatibel mit dentalen Modellierwachsen. Erleichtert ein spalt- und verzugsfreies Abheben der Wachsarbeit. Verhindert durch Wachs hervorgerufene Schlierenbildung auf der Kroneninnenseite. Keine Reaktion mit der Einbettmasse. Isofix ist lösungsmittelfrei und wasserlöslich.

### Lagerung

Fest verschlossen lagern

### Entsorgung

Mit dem allgemeinen Laborabfall (Glas)

Rev. 02/16



DFS-Diamon GmbH  
Ländenstraße 1  
93339 Riedenburg  
Germany