

## Plastodur

Erstelldatum: 18.11.2014

Überarbeitet am:



\*Beispielabbildung

### Anwendungsbereich

Erhöht die Wirkung von Isoliermitteln und verhindert Abrasion. (z.B. Antagonistenkontakte bei Artikulationsbewegungen).

### Anwendungsweise

- Mit Pinsel 1-2 Mal nach Bedarf unverdünnt auftragen.
- Kratzfest nach 15 min.
- Hochfest nach 30 min.

### Schutzmaßnahmen

Für ausreichende Luftzufuhr sorgen.

### Eigenschaften

Schnell härtend, kratzfest, wasserabweisend

### Haltbarkeit

2 Jahre

### Lagerung

- Bei konstanter Temperatur nicht über 35°C.
- Nicht direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Vor Frost schützen.

### Achtung

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen!

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH  
Ländenstraße 1  
93339 Riedenburg  
Germany