


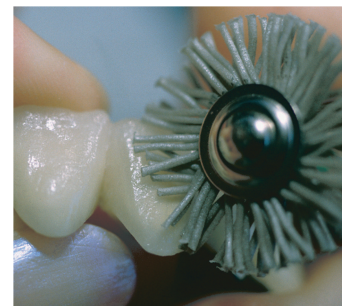
UPOFIX® - POLIERER

Erstelldatum: 03.12.2014

Überarbeitet am: 




* Beispielabbildung



*Anwendungsbeispiel

Bürsten	Anwendung	Anwendungsgebiet
0	Polieren	alle Metalle
I	Vorpolieren	alle Metalle
II	Glanzpolieren	alle Metalle
III	Vorpolieren	Keramik
IV	Glanzpolieren	Keramik
IV	Vorpolieren	Komposite
V	Glanzpolieren	Komposite

Achtung: 3' – 5.000 UpM (langsam mit erhöhtem Anpressdruck)

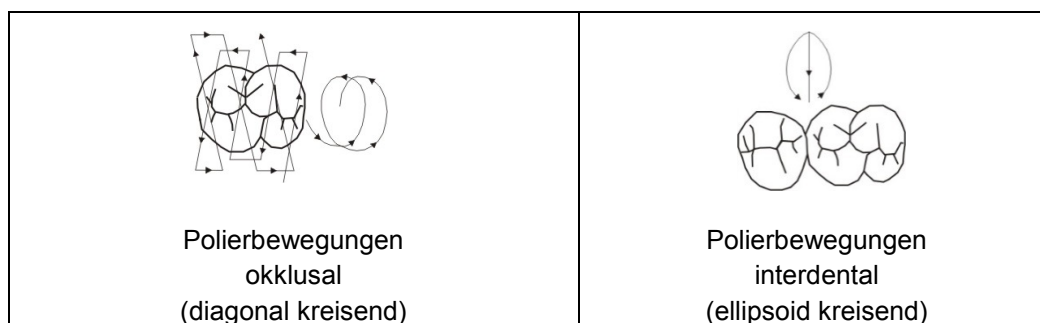

Langsame Drehzahlen - 3000 UpM und erhöhter Anpressdruck: Abrasives (Vor-)Polieren

Erhöhte Drehzahlen 3000-5000 UpM mit leichten bis keinem Druck: Endpolitur.

Weiteres siehe Beschreibung im Labor-Katalog

Rev. 12/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany