

Vernice d'argento conduttiva GALVANET

Uso:

Agitare bene prima dell'uso!

Richiudere bene dopo l'uso!

Sgrassare le superfici metalliche prima dell'applicazione (es. con alcol)!

Stendere sulle superfici in gesso solo se queste sono completamente asciutte. Se necessario, asciugarle nel microonde.

Stendere **una volta** usando un pennello. Per ottenere una pellicola sottile e omogenea, tenere il pennello quanto più possibile piatto e stendere il prodotto velocemente solo in una direzione! L'ideale è creare **uno** strato coprente. Evitare i ritocchi alla superficie verniciata e la formazione di zone di accumulo del prodotto. Lasciare asciugare completamente. GALVANET è una vernice conduttiva che asciuga molto velocemente. Si consiglia di lasciar asciugare per 5 minuti prima di procedere al passaggio di lavorazione successivo.

Dopo averlo estratto dal bagno d'oro, al termine del processo galvanico, dissolvere il moncone in gesso con un apposito solvente in vasca a ultrasuoni. Se il processo galvanico viene eseguito direttamente sul metallo, staccare con attenzione la cappetta galvanica dalla parte primaria. Eliminare poi lo strato di vernice conduttiva dalla cappetta in oro con una soluzione al 30% di acido nitrico in vasca a ultrasuoni.

Precauzioni:

- Tenere lontano da tutto ciò che potrebbe generare scintille.
- Evitare il contatto con la pelle.
- Non usare acqua per spegnere eventuali fiamme.
- Aerare bene il locale. Non inalare i vapori.
- Indossare occhialini di protezione e guanti resistenti ai solventi.
- Rifiuti tossici. Non scaricare nella rete fognaria

Proprietà:

Infiammabile.

Conservazione:

Tenere il flacone ben chiuso per evitare l'evaporazione.

Produttore:

DFS-DIAMON GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 07/14