

## Spray de Silicona

### **Aplicación:**

Agitar bien antes de utilizar!

DFS Spray de Silicona es un agente antiaglomerante universal para aislar combinaciones de material iguales o distintas que pulveriza de manera extremadamente fina, entre otros de yeso/acrilico, yeso/goma (base de modelo), yeso/metal (limpieza respectivamente protección contra contaminación de articuladores), yeso/cera, yeso/yeso (modelos splitcast). El Spray de Silicona encuentra distintos usos y no es adecuado para una aplicación intraoral.

Recomendamos rociar el objeto de forma intermitente desde una distancia de aprox. 10 cm. Normalmente es suficiente una sola aplicación. En el caso de aislamiento basal de arcadas dentales con pin antes de la fabricación de la base del modelo, recomendamos una segunda aplicación ya que la primera capa es frecuentemente absorbida por el yeso. Además la silicona evita la abrasión de puntos de contacto oclusales del yeso durante movimientos de articulación en el articulador. En todo caso evitar la formación de charcos.

La silicona mantiene el hule, por ejemplo formadores de zócalos para modelos, empaques de ollas de presión y anillos, elástico y suave y evita desecamiento y fragilización.

### **Medidas de protección:**

- Mantener alejado de fuentes de ignición.
- Se recomienda el uso de una gafa protectora.
- No usar agua para apagar el fuego.
- Asegurar suficiente ventilación de la habitación.
- No inhalar la niebla de la pulverización.
- Eliminación como residuo peligroso.
- Evitar derrame al alcantarillado.

### **Propiedades:**

Inflamable.

### **Almacenaje:**

Almacenar fresco o a temperatura ambiente.

### **Fabricante:**

DFS-DIAMON GmbH \* Ländenstraße 1 \* D-93339 Riedenburg \* +49 9442 91890

---

Rev. 09/14