

Clean-Orange (Orangen-Reiniger)

Erstelldatum: 18.11.2014

Überarbeitet am: / /



*Beispielabbildung

Anwendungsbereich

Oberflächenreinigung von Labor –und Praxismöbeln und Edelstahlflächen; Vorsicht: kann einige Kunststoffe auflösen, Reinigung von Abdrucklöffeln

Anwendungsweise

Verdünnung mit Wasser, je nach Verschmutzungsgrad

Qualität

Beseitigt Reste von Silikon, Alginate und Zink-Eugenol-Pasten und Blut. Nicht geeignet zum Einsatz im Ultraschallbad.

Risiken

Bei Verschlucken ärztlichen Rat einholen, Haut und Augenkontakt vermeiden, kann Hautreizungen hervorrufen.

Entsorgung

Pur nicht in die Kanalisation gelangen lassen

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Germany