

## Silikon- und Wachsentspanner

Erstelldatum: 18.11.2014

Überarbeitet am: / /



500ml Flasche inkl. Sprühflasche

\*Beispielabbildung

### Anwendung

Vor Gebrauch schütteln! Nach Gebrauch gut verschließen!

Trockene Silikonabdrücke vor dem Ausgießen mit Gips oder Einbettmasse, sowie Wachs- und Flexettenteile vor dem Einbetten mit Silikon- und Wachsentspanner in einem Abstand von 15-20 cm sparsam und gleichmäßig einsprühen. Dabei das Modell im Sprühnebel drehen. Die Entstehung von Pfützen ist zu vermeiden. In einem solchen Fall empfehlen wir überschüssigen Entspanner mit sanftem Luftstoß trocken zu blasen. Vor dem Einbetten muss der Entspanner völlig abgetrocknet sein um Gussungenauigkeiten zu vermeiden. Der Silikon- und Wachsentspanner erzielt kantenscharfe Wiedergabegenauigkeit und erleichtert blasenfreie Güsse. Feine Retentionen und Klammerpartien bei Modellgussarbeiten werden in vorzüglicher Wiedergabequalität abgebildet.

### Schutzmaßnahmen

- Von Zündquellen fernhalten
- Raum gut lüften
- Dämpfe nicht einatmen
- Schutzbrille tragen
- lösungsmittelbeständige Schutzhandschuhe tragen
- Umgebungsluft unabhängige Atemschutzmaske tragen

### Eigenschaften

Silikon- und Wachsentspanner reduziert die Oberflächenspannung von Silikonem und Wachs und erleichtert eine bessere Adaption der feuchten Einbettmasse an sonst wasserabweisende Oberflächen.

Leicht entzündlich!

### Lagerung

Lagerung in Übereinstimmung mit den Vorschriften über das Lagern brennbarer Flüssigkeiten (VdF). Lagerzeit maximal 2 Jahre.

Rev. 11/14



DFS-Diamon GmbH  
Ländenstraße 1  
93339 Riedenburg  
Germany