

Cera cervical, violeta



*Ejemplo de ilustración

Ámbito de aplicación

Para modelar con precisión los márgenes de las coronas en la técnica de colado y prensado.

Método de aplicación

El encerado preciso es posible tanto con una cuchilla de cera eléctrica como de forma convencional. La cera cervical puede aplicarse suavemente y sin tensión. No tiende a mancharse durante el procesamiento posterior con instrumentos de modelado. Gracias a su contracción de solidificación extremadamente baja, tiene propiedades similares a las del plomo. Esto permite obtener márgenes de corona precisos.

Calidad

Cera cervical de alta calidad con muy buena adaptación y muy baja contracción.

Color: violeta

Dureza: blanda

Temperatura de fusión: aprox. 59°C / 138,2°F

Adecuado para cerámica prensada!

Riesgos

Enfríe las gotas de cera caliente sobre la piel lo antes posible bajo un chorro de agua fría y, a continuación, despegue con cuidado la cera solidificada.

Almacenamiento

- Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado
- Proteger de la luz solar
- Temperatura óptima de almacenamiento: 5 -30 °C

Eliminación de residuos

Los envases completamente vacíos pueden enviarse a reciclar

Rev. 24/10



DFS-Diamon GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Alemania