

Alambre de cera, verde (1,5 / 2,5 / 3 mm)



*Ejemplo de ilustración

Ámbito de aplicación

Para enclavijar objetos colados en la técnica de colado de coronas, puentes y modelos. También adecuado para enclavijar objetos de cerámica prensada.

Método de aplicación

Conecte el alambre de cera acortado al objeto fundido o prensado. El procesamiento es posible tanto con una cuchilla de cera eléctrica como de forma convencional. Consulte las especificaciones del fabricante para conocer el diámetro de los respectivos sistemas de fundición o prensado. El alambre de cera está libre de fuerzas restauradoras, puede doblarse sin fisuras y evita así la deformación involuntaria de los objetos.

Calidad

Alambre de cera flexible, sin tensión, dimensionalmente estable y quemable sin dejar residuos.

Color: verde

Dureza: duro

Temperatura de fusión: aprox. 45°C / 113°F (baja contracción)

Adecuado para cerámica prensada!

Riesgos

Enfríe las gotas de cera caliente sobre la piel lo antes posible bajo un chorro de agua fría y, a continuación, despegue con cuidado la cera solidificada.

Almacenamiento

- Mantener el envase bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado
- Proteger de la luz solar
- Temperatura óptima de almacenamiento: 5 -30 °C

Eliminación de residuos

Los envases completamente vacíos pueden enviarse a reciclar.

Rev. 24/10



DFS-Diamon
GmbH
Ländenstraße 1
93339 Riedenburg
Alemania